

Anwendungshinweise für orthopädische Maßschuhe

Sie erhalten heute Ihre von uns gefertigten orthopädischen Maßschuhe. Diese haben wir sorgfältig nach den Vorgaben Ihres Arztes und nach unseren Erkenntnissen aus dem Beratungsgespräch gefertigt. Beachten Sie aber, dass die orthopädischen Maßschuhe nur ihren Zweck erfüllen, wenn die nachfolgenden Anweisungen befolgt werden.

- Tragen Sie Ihre orthopädischen Maßschuhe zu Beginn nur stundenweise. Erhöhen Sie die Tragezeit täglich. Nach 10- 14 Tagen sollten die Schuhe problemlos den ganzen Tag getragen werden können.
- Tragen Sie ausschließlich Ihre orthopädischen Maßschuhe, um den Therapieerfolg sicherzustellen.
- Kommen Sie spätestens 6 Wochen nach Erhalt Ihrer orthopädischen Maßschuhe zur Kontrolle zu uns.
- Tragen Sie immer Strümpfe. Vermeiden Sie Strumpffalten.
- Schließen Sie alle Verschlüsse gleichmäßig, so dass der Druck gleichmäßig über die gesamte Verschlussfläche verteilt ist und der Schuh fest am Fuß sitzt.
- Vermeiden Sie allerdings zu festes Schließen, um die Blutzirkulation nicht zu beeinträchtigen.
- Kontrollieren Sie Ihre Füße zu Beginn (14 Tage) täglich auf Druckstellen, Hautrötungen, Blasenbildung und allergische Reaktionen. Sollten Sie Auffälligkeiten feststellen, nehmen Sie unverzüglich Kontakt zu uns auf.
- Bei Kindern ist unbedingt auf das Wachstum zu achten. Zu kleine Schuhe behindern den Therapieerfolg und müssen umgehend ersetzt werden.

Ihre orthopädischen Maßschuhe haben keine festgelegte Nutzungsdauer. Diese ist abhängig von Art und Umfang des Gebrauchs. Kommen Sie daher bitte regelmäßig zu Kontrolle. Sollten Sie einen der folgenden Punkte an Ihren Einlagen feststellen, vereinbaren Sie umgehend einen Termin mit uns.

- Die Laufsohle ist verschlissen
- Das Oberleder ist abgestoßen oder bricht auf.
- Das Futterleder ist beschädigt oder verhärtet und brüchig.
- Das Fußbett ist extrem verformt.
- Das Fußbett hat Risse, ist brüchig oder dunkel verfärbt.

Damit Ihre orthopädischen Schuhe möglichst lange ihre Wirkung behalten, berücksichtigen Sie die nachstehenden **Pflegehinweise**:

- Wechseln Sie Ihre orthopädischen Maßschuhe täglich.
- Orthopädische Maßschuhe sind nicht für die Waschmaschine geeignet. Reinigen Sie sie ggf. mit einem feuchten Tuch und geeigneten Pflegemitteln. Tipps zur Pflege bekommen Sie von uns.
- Sollten die orthopädischen Maßschuhe nass werden, trocknen Sie diese an der Luft. Niemals auf Heizung oder Ofen legen.
- Defekte und verschlissene Teile müssen umgehend repariert werden. Selbstverständlich führen wir diese Instandhaltungsarbeiten gerne in unserer Werkstatt für Sie aus.

Für weitere Fragen, Wünsche und Anregungen sprechen Sie uns bitte an. Gern nehmen wir uns die Zeit für ein persönliches Gespräch.